



Diagnostica Spire srl - via E. Fermi, 63/F - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522.767130 - www.diagnosticaspire.it - info@diagnosticaspire.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DI EFFETTUARE I PRELIEVI

HelicobacTest	Prima di effettuare il test attendere almeno 10 giorni dall'ultima assunzione in caso di terapia antibiotica, terapia con farmaci antisecretivi P.P.I. e terapia con antidiarroeici.
InTESTinal Inflammation	In caso di terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) in corso occorre attendere almeno 10 giorni dall'ultima assunzione prima di effettuare il test. I pazienti che assumono regolarmente farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono esibire livelli elevati di calprotectina fecale. I risultati non possono essere clinicamente applicabili a bambini di età inferiore a 4 anni.
InTESTinal 360	Prima di effettuare il test attendere almeno 10 giorni dall'ultima assunzione in caso di terapia antibiotica, di terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e utilizzo di probiotici. Il test non può essere eseguito a ridosso di esami effettuati con liquidi di contrasto (es. bario) o radiografie. I risultati non possono essere clinicamente applicabili a bambini di età inferiore a 4 anni.
FECAL PATOBIOTA	In caso di terapia antibiotica in corso o utilizzo di probiotici, occorre attendere almeno 10 giorni dall'ultima assunzione prima di effettuare il test. Il test non può essere eseguito a ridosso di esami effettuati con liquidi di contrasto (es. bario) o radiografie.
AROMA MICROBIOTA	In caso di terapia antibiotica in corso o utilizzo di probiotici, occorre attendere almeno 10 giorni dall'ultima assunzione prima di effettuare il test. Il test non può essere eseguito a ridosso di esami effettuati con liquidi di contrasto (es. bario) o radiografie.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SPEDIZIONE



Per l'invio del kit effettuare la richiesta di ritiro prima dell'esecuzione del prelievo.

La raccolta dei campioni deve essere organizzata in modo tale da evitare la spedizione dei campioni nella giornata di venerdì.

È FONDAMENTALE PRIMA DI ESEGUIRE IL PRELIEVO, CONTATTARE

**L'ASSISTENZA AL NUMERO 0522767130,
AFFINCHÉ POSSANO ESSERE VERIFICATI I TEMPI DI RITIRO DEL
CAMPIONE**

(ossia il tempo necessario al corriere per ritirare il campione in base alla località servita).






ISTRUZIONI DI PRELIEVO

KIT DI AUTOPRELIEVO FECI DIAGNOSTICA SPIRE



ISTRUZIONI DI RACCOLTA MATERIALE BIOLOGICO

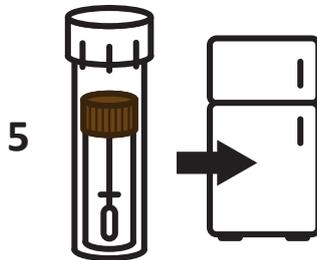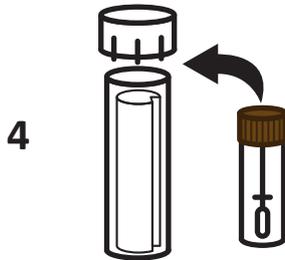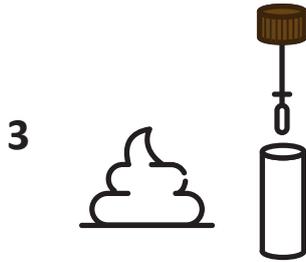

LA SERA PRIMA DELLA RACCOLTA DEL CAMPIONE:

1. Immergere le PolarPads® in acqua per 10 minuti circa in modo che tutte le singole celle siano gonfie di acqua.
2. Porre PolarPads in Freezer per almeno 12 ore.

È IMPORTANTE RACCOGLIERE I CAMPIONI LA MATTINA STESSA DELLA CONSEGNA/SPEDIZIONE OPPURE AL MASSIMO IL POMERIGGIO PRIMA (MANTENENDOLI IN FRIGO +4°).

3. Mettere una piccola quantità di feci solide o liquide, come un nocciolo di albicocca all'interno della provetta con **TAPPO MARRONE** (riempire la provetta per circa un quarto della sua capienza).
4. Riporre la provetta nel suo porta provette bianco con foglio assorbente e chiudere il tappo.
5. Conservare in frigorifero, lontano da fonti di calore e luce.
6. Qualche ora prima del passaggio del corriere, riporre la provetta con il campione all'interno della busta trasparente.
7. Inserire all'interno della scatola di cartone le PolarPads® precedentemente congelate per 12 ore.
8. Inserire la busta trasparente con il campione prelevato nella scatola di cartone.
9. Posizionare la scatola di cartone all'interno della propria fascetta. Inserirla nella busta del corriere fornita e consegnarla al vettore.

IMPORTANTE:

Prima di effettuare il prelievo è fondamentale leggere attentamente le indicazioni riportate nelle note "AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DI EFFETTUARE I PRELIEVI" e "IMPORTANTI INDICAZIONI DI SPEDIZIONE".